


# Unité d'annulation d'appel

avec buzzer de renvoi sonore

REF : NPWU2-BDFA

Ancienne réf : TC114200B

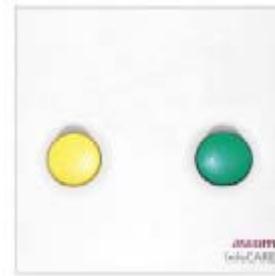

## Description.

Unité d'appel murale équipée de 2 boutons.

Utilisation système :

**teleCARE SB, teleCARE SC teleCARE M  
teleCARE WL** (lorsque l'unité est raccordée à une unité d'appel radio)

Cette unité comprend :

- un bouton vert, annulation d'appel réservé au personnel de soins.
- un bouton jaune, également réservé au personnel de soins.
- un buzzer de renvoi sonore intégré.

Elle s'installe à l'aide d'une plaque de fixation qui offre l'avantage de s'adapter sur la plupart des coffrets standards d'encastrement.

Une entretoise de fixation est également disponible pour un montage en saillie.

Quel que soit le besoin, la plaque ou l'entretoise de fixation est à commander séparément.

Accessoires complémentaires :

- Plaque de fixation R281145 **(TC811100B)**
- Entretoise de fixation R281149 **(TC811150B)**
- Câble de liaison pour double ou triple module R190192 **(TC810100)**
- Câble de liaison pour double ou triple module avec entretoise R190193 **(TC810000)**

Fonctions configurables (suivant système) :

Les fonctionnalités du bouton jaune sont paramétrables à l'aide de plots à souder sur le circuit imprimé.

Ceci permet d'affecter à ce bouton, suivant les applications, les sorties SET /RESET ou R+S.

Fonctions disponibles.

-  Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence
-  Annulation d'appel / Appel d'urgence / Appel d'assistance / Présence 2

A noter :

Le buzzer de renvoi fonctionne dans une chambre lorsque l'une des deux présences est activée par le personnel de soins.

Il permet de signaler au personnel de soins dans la chambre qu'une autre chambre est en appel.

Trois tonalités permettent de distinguer le niveau d'appel en cours.

L'appel d'urgence s'effectue en exerçant une pression de 3 secondes sur le bouton vert de l'unité.

Chaque bouton possède son propre voyant. Ces voyants restent en permanence faiblement éclairés pour que l'unité puisse être facilement repérée dans l'obscurité. Lorsqu'une fonction est sollicitée (appel normal, présence, assistance...) le circuit active alors une lumière vive de confirmation ou de tranquillisation.

Note: Version après 06-2008 bornier détachable, montage câble par pression  
Référence du bornier détachable: NICT-8AA Connecteur 8 points

### Caractéristiques Techniques

Boîtier :	ABS, blanc
Dimensions avec plaque de fixation :	91x91x17mm (L x h x P)
Dimensions avec entretoise :	91x91x40mm (L x h x P)
Voyants de tranquillisation :	Led électroluminescente
Tension d'utilisation :	24V/DC (de18V/DCà30V/DC)
Consommation :	13mA (mini) 26 mA (maxi) 1 x LED on 39mA (maxi) 2 x LED on
Connexions :	Par connecteur 8 points pour des fils de 0.6 mm Ø
Inter connexions :	connecteur 1 x 5-pin
Environnement :	0 - 40°C / 80% humidité
Standards et certification :	CE, IP 40
Marquage usine :	NPWU2-BDFA